



PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE BOVINA EM AMOSTRAS DE SWABS

Exame: Cultura para identificação de bactérias

Material:

- Meio de transporte Swab Stuart:

Procedimentos:

- Marcar o número das vacas amostradas;
- Esfregar o swab stuart no orifício do teto e laterais, antes de qualquer limpeza, assim que o animal entrar na sala de ordenha (momento zero);
- Esfregar o swab stuart no mesmo teto após o pré dipping (respeitando o tempo de ação recomendado pelo fabricante);
- Esfregar o swab stuart na teteira do mesmo teto após a ordenha;
- Esfregar o swab stuart no mesmo teto após o pós dipping.

ENVIO DO MATERIAL:

- Não congelar o swab stuart;
- Enviar em até dois (02) dias após a coleta em uma caixa de isopor, com gelos recicláveis.

Sugestão: Fazer 10 tetos (escolher um de cada vaca, sempre o mesmo teto- 4 momentos cada teto). De preferência pegar do lote limpo, e do lote CCS alta= 40 swabs stuart.