

## COLETA DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS (In vivo)

**Exames:** Pesquisa direta do agente por PCR – Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, IBR, BVD, BRSV, PI3.

### **Materiais:**

- Tubos ou frascos estéreis e tampa de rosca;
- Luva descartável;
- Swab estéril simples sem meio de cultura

### **Procedimentos:**

#### **Amostra Swab Nasal**

1. Limpar o local com gaze estéril umedecida em solução fisiológica (retirando crosta, se houver)
2. Abertura do swab somente no momento da coleta;
3. Introdução do swab na cavidade nasal;
4. Movimento de rotação (friccionando energeticamente o local, pressionando contra a parede nasal) para coletar o material;
5. Utilizar um swab para cada narina, podendo colocar os 2 em um mesmo frasco.
6. Acondicionar em tubo estéril seco e congelar logo após a coleta.

#### **Amostra Órgãos**

1. No caso de óbito – Retirar os órgãos (pulmão, traqueia) durante a necropsia;
2. Coletar fragmento, de ambos, em tubo estéril seco e congelar logo após a coleta.

**Manutenção e envio do material:** – Material coletado tem que estar congelado