

AMOSTRA DE FEZES – PARASITOLÓGICO

COLETA:

1. Coletar em coletor universal estéril as fezes frescas, diretamente do reto (utilizando luvas), ou de uma porção do bolo fecal imediatamente após a defecação, porção esta que não entrou em contato a superfície;
2. Manter a amostra refrigerada (2 a 8°C) até o momento do envio.

ENVIO:

- Colocar o frasco contendo o material em saco plástico vedado;
- Enviar o material em caixa de isopor contendo quantidade suficiente de gelo seco ou reciclável, considerando o tempo do transporte;
- O material não deve ficar em contato direto com o gelo;

LABORATÓRIO VETERINÁRIO