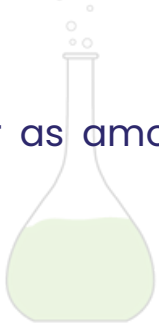


## PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE LEITE PARA CULTURA E ANTIBIOGRAMA

### 1. COLETA DE LEITE PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE BOVINA

**Exames: Cultura de leite individual para diagnóstico de bactérias**

**Material para coleta:**

- Tubos ou frascos estéreis;
  - Luva descartável;
  - Caixa isotérmica ou de isopor para colocar as amostras após a coleta e no transporte ao laboratório;
  - Álcool 70%
  - Algodão ou gaze;
  - Papel toalha;
  - Solução desinfetante para imersão dos tetos antes da ordenha;
  - Caneta e etiqueta.
- 

**Procedimentos:**

- 01.** O animal não deve estar em tratamento com antibióticos por no mínimo 7 dias.
- 02.** Anote no frasco o número ou o nome do animal e o teto coletado. Utilize caneta e etiqueta resistente à água, com letra legível;
- 03.** Lave e desinfetar as mãos com sabão ou detergente neutro em água corrente e aplique álcool. Use uma luva descartável para cada animal;
- 04.** Retire a sujeira do teto que será amostrado com papel toalha. Tetos limpos não precisam ser lavados. O uso de água para lavar os tetos é recomendado apenas em casos de muita sujeira, como lama e fezes, pois podem causar contaminações. Se houver necessidade de lavar os tetos, não molhe o úbere para evitar a contaminação do leite com gotículas de água;

- 05.** Faça o pré-dipping, ou seja, a imersão dos tetos em solução desinfetante própria e deixe agir por 30 segundos;
- 06.** Enxugue o teto com um papel toalha, sem usar o mesmo papel toalha para tetos diferentes;
- 07.** Esfregue algodão ou gaze com álcool 70% no orifício do teto. Inicie nos 2 quartos mais distantes e depois nos outros 2 mais próximos de você;
- 08.** Despreze os três primeiros jatos;
- 09.** Abra o frasco somente no momento da coleta. Não tocar com as mãos na abertura do frasco ou no lado de dentro da tampa. Não permitir que a abertura do frasco toque qualquer superfície ou o teto do animal;
- 10.** Colete o leite direcionando os jatos dentro do frasco, evite enchê-lo completamente. Feche o frasco imediatamente após a coleta. Verifique se o frasco está bem tampado e acondicione o frasco cuidadosamente, em pé, para evitar seu tombamento e o derramamento do leite;
- 11.** Após a coleta, os frascos devem ser mantidos sob congelamento.

## **2. ENVIO DO MATERIAL**

O material coletado deverá ser congelado e enviado sob refrigeração (+2°C a +8°C), identificados e em caixas de isopor com gelo reciclável, lacrada e identificada, com a ficha de solicitação de exames e ficha de cadastro. Em caso de dúvidas entrem em contato com o laboratório

## **3. CRITÉRIOS PARA REJEIÇÃO DAS AMOSTRAS:**

Material sem identificação; frascos não estéreis; animais tratados com antibióticos por período inferior a 7 dias do dia da coleta da amostra; conservação inadequada quando da chegada ao laboratório; frascos rachados ou semi-abertos; derramamento do leite, mesmo em pequena quantidade.