

AMOSTRA DE URINA

COLETA

1. Coletar no mínimo 1 mL de urina por micção espontânea, micção induzida, punção vesical ou sonda uretral;
2. Para o exame de urinálise, recomendamos o envio de no mínimo 5 mL
3. Manter a amostra refrigerada (2 a 8 graus Celsius até o momento do envio)

ENVIO

- Colocar o frasco contendo o material em saco plástico vedado;
- Enviar o material em caixa de isopor contendo quantidade suficiente de gelo seco ou reciclável, considerando o tempo de transporte;
- O material não deve ficar em contato direto com o gelo;

LABORATÓRIO VETERINÁRIO